



Fartuch BioClean-C™ z rękawami - sterylny S-BCAS

Sterylny, lekki fartuch ochronny, chroniący przed szeregiem leków stosowanych w chemioterapii

- **Zapewniona ochrona:** Fartuch BioClean-C™ z rękawami - sterylny S-BCAS jest testowany zgodnie z normą przenikania ASTM F739-12, w celu zapewnienia ochrony osobistej przed szeregiem leków cytotoksycznych.
- **Zmniejszona waga i ryzyko zanieczyszczenia:** Zaprojektowany z materiału CleanTough™, ten odporny na chemikalia fartuch jest zarówno lekki, jak i niestrzepiący się, co zapewnia łatwość użytkowania i minimalne ryzyko zanieczyszczenia
- **Zwiększona wytrzymałość:** Dzięki ultradźwiękowo klejonym szwom i taśmie ochronnej ten odporny na leki do chemioterapii fartuch roboczy jest również wytrzymały i niezawodny
- **Lepsze dopasowanie i możliwość regulacji:** Ponadto ten fartuch ochronny ma regulowane zapięcie na szyi i taśmy do wiązania z tyłu, dzięki czemu użytkownicy mogą znaleźć idealne dla siebie dopasowanie



Key Features and Benefits

- **Norma przenikania ASTM F739-12:** Odporność na leki cytotoksyczne
- **Materiał CleanTough™:** Lekkie, niestrzepiące się, ograniczające zanieczyszczenie
- **Ultradźwiękowo klejone szwy:** zwiększona wytrzymałość i ochrona

Branże

- Środowiska kontrolowane/krytyczne
- Produkcja i wytwarzanie
- Laboratoria i działy badawczo-rozwojowe

WWW.ANSELL.COM



Ansell



Fartuch BioClean-C™ z rękawami - sterylny S-BCAS

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiał	Polietylen / polipropylenowy laminat, nietkany
Kolor	Niebieski
Normy audytu	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Normy	ASTM F739, CE 0598, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 14325, ISO 11137-1:2006, Partial Body Protection Only, Kategoria III, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009, UKCA
Przegląd opakowań	Jedna sztuka na szczelnie zamknięty woreczek; jeden woreczek na szczelnie zamknięty zewnętrzny worek PE; 40 zewnętrznych worków na wyściełany karton (40 sztuk)
Metoda sterylizacji	Promieniowanie GAMMA (25 kGy)
Sterylnizacja, minimalna dawka	25kGy
Okres trwałości	3 years
Budowa	Ultrasonically bonded sleeve seams with protective tape & 100% polyester elasticated cuffs.
Charakterystyka	Pozostawiający mało cząstek stałych

WYNIKI TESTU ŚCIERALNOŚCI CZĄSTEK

WYNIK	TESTU
Test uwalniania cząstek stałych Helmke Drum	$\geq 0,5$ Qm (zliczeń/cm ²) <1700

WYNIKI METODY TESTOWANIA ASTM F739-12

LEK	Średni czas przenikania (MBT), minuty Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
CISPLATYNA	>480
KARMUSTYNA	>480
CYKLOFOSFAMID	>480
CHLOROWODOREK DOKSORUBICYN	>480
5-FLUOROURACYL	>480
METROTREKSAT	>480
ETOPOZYD	>480
PAKLITAKSEL	>480
TIOTEPA	>456

Wyniki uzyskane w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych przez akredytowane, zewnętrzne laboratorium testowe. *W przypadku Bioclean D i Bioclean 2000 wyniki przenikania substancji chemicznych odnoszą się do wydajności tkaniny wyłącznie w celach informacyjnych. Szwy i zamknięcia mogą mieć krótsze czasy przebicia. Zalecamy zakładanie na kombinezon odzieży z uszczelnionymi szwami, takiej jak Bioclean-C, w celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed lekami stosowanymi w chemioterapii.

TABELA ROZMIARÓW

BCAS-S: Rozmiar: S, Klatka piersiowa: 84-92cm (33"-36"), Wzrost: 164-170cm Rozmiar: (5'4"-5'6")
BCAS-M: Rozmiar: M, Klatka piersiowa: 92-100cm (36"-39"), Wzrost: 170-176cm Rozmiar: (5'6"-5'9")
BCAS-L: Rozmiar: L, Klatka piersiowa: 100-108cm (39"-42"), Wzrost: 176-182cm Rozmiar: (5'9"-6'0")
BCAS-XL: Rozmiar: XL, Klatka piersiowa: 108-116cm (42"-45"), Wzrost: 182-188cm Rozmiar: (6'0"-6'2")



Fartuch BioClean-C™ z rękawami - sterylny S-BCAS

WYNIKI TESTU WYDAJNOŚCI MATERIAŁÓW

WYNIK	TESTU	KLASA WYDAJNOŚCI	PERFORMANCE STANDARD
Odporność na ścieranie	>10 cycles	1	EN 12947-2
Odporność na przekłucie	>5 N	1	ISO 13996
Odporność na rozdzielanie (metoda trapezowa), w kierunku poprzecznym (CD)	EN ISO 9073-4	1	EN ISO 9073-4
Odporność na rozdzielanie (metoda trapezowa), w kierunku wzdłużnym (MD)	>10 N	1	EN ISO 9073-4
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym (CD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym (MD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Odporność na działanie cieczy – 30% H ₂ O ₂ /SO ₂	>90%	3	ISO 6530
Odporność na działanie cieczy – 10% NaOH	>90%	3	ISO 6530
Odporność na działanie cieczy – o-Xylene	>90%	2	ISO 6530
Odporność na działanie cieczy – Butan-1-ol	>90%	3	ISO 6530
Penetracja cieczami – 30% H ₂ O ₂ /SO ₂	<1%	3	ISO 6530
Penetracja cieczami – 10% NaOH	<1%	3	ISO 6530
Penetracja cieczami – o-Xylene	<1%	3	ISO 6530
Penetracja cieczami – Butan-1-ol	<1%	3	ISO 6530
Wytrzymałość szwów ¹	>50 N	2	ISO 13935-2

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

	ROZMIAR	S, M, L, XL
S-BCAS	NR DO PONOWNEGO ZAMÓWIENIA	S-BCAS-S, S-BCAS-M, S-BCAS-L, S-BCAS-XL

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Ameryka Łacińska i Karaibów

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Zgodność z normami wydajności i regulacjami



Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.

Sprawdź pakiet weryfikacji produktu lub skontaktuj się z działem obsługi firmy Ansell, aby uzyskać konkretne informacje na temat stosowania odzieży z lekami cytotoksycznymi. Odzież stosowana do ochrony przed takimi lekami musi zostać dopasowana do specyficznych substancji chemicznych w użyciu.

